

دستورالعمل کار با دستگاه اتوکلاو

- 1- شیر آب را چک کنید که باز باشد
- 2- دستگاه روشن شود
- 3- فشار بخار 2/5 بار باشد
- 4- وسایل را به گونه ای در داخل دستگاه قرار دهید که بخار به تمامی نقاط ست ها برسد
- 5- جهت اطمینان از استریل وسایل داخل آنها اندیکاتور قرار دهید
- 6- از بسته بودن درب اطمینان حاصل نمایید
- 7- شیر های ورود بخار به داخل چمبر را باز کنید
- 8- در دمای 121 درجه دستگاه پس از 45 دقیقه وسایل را استریل می کند
- 9- پس از گذشتن زمان لازم شیر تخلیه را باز نموده تا بخار کاملاً تخلیه شود
- 10- شیر خلا را باز نموده بمدت 10 دقیقه ست ها و پگ ها در این وضعیت باقی مانده تا خشک شود
- 11- درب اتوکلاو را باز نموده وانیکاتور را چک کنید
- 12- در صورتی که اندیکاتور استریل بودن وسایل را تایید نمود وسایل را خارج نموده و در سبد های فلزی جهت سرد شدن قرار دهید
- 13- پس از سرد شدن وسایل را مرتب داخل قفسه ها قرار دهید و آماده ارسال به بخش ها باشد

با تشکر پرستار کنترل عفونت بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام